

ReSound LiNX™

Ghid rapid de utilizare al aparatelor auditive ReSound LiNX cu iPhone



Bluetooth LE
2.4 GHz WIRELESS



smartRange

Made for

iPod iPhone iPad



audionova

Ghid de utilizare si configurare rapida pentru functiile MFi (Made for iPhone)

Cerinte hardware

Resound LiNX este compatibil cu urmatoarele dispozitive hardware Apple.

- iPhone® 5S
- iPhone® 5C
- iPhone® 5
- iPad® Air
- iPad® 4th generation
- iPad® mini cu display Retina
- iPad® mini
- iPod® touch 5th generation

Aparatele auditive MFi sunt compatibile cu iOS7.x sau o versiune mai recenta.

Conectarea aparatelor auditive Resound LiNX cu iPhone, iPad sau iPod

Conectarea aparatelor auditive cu dispozitivul Apple

Pentru inceput, asigurati-va ca aveti aparatele auditive Resound Linx pregatite cu baterii noi. Inca nu inchideti usita bateriei aparatelor.

- 1.Daca nu este pornit, activeaza Bluetooth-ul pe dispozitivul tau Apple
- 2.Du-te la **Configurari (Settings) > General**. Apoi din meniul **General** selecteaza **Accesabilitate(Accessibility)**
- 3.Porneste aparatele auditive Resound LiNX, inchizand usitele bateriilor.
- 4.Selecteaza **Aparate Auditive (Hearing Aids)** din meniul **Accesabilitate(Accessibility)** de pe dispozitivul tau Apple
- 5.Odata intrat in meniul **Aparate Auditive(Hearing Aids)**, o sa apara numele aparatelor tale auditive alaturi de numele Resound si seria modelului.
- 6.Apasa pe numele aparatelor tale auditive.

7. O sa apara un mesaj de acceptare a conectarii aparatelor cu iPhone, iPad sau iPod-ul touch. Apasa "Imperechere"(Pair) pentru a incepe procesul de conectare cu aparatele tale auditive Resound LiNX. Pentru conectarea a doua aparate auditive ReSound LiNX, vor aparea doua mesaje separate de "Imperechere"(Pair).


8. Iphone-ul, iPad-ul sau iPod-ul touch, se vor conecta automat la aparatele Resound LiNX

Nota: Acest prim proces de conectare, include de asemenea un proces de autentificare Mfi.

IN TIMPUL APARITIEI ACESTUI PROCES DE AUTENTIFICARE, NU INCEPETI SA FACETI NICI UN FEL DE STREAMING PE RESOUND LiNX DUPA APASAREA CERERII DE CONECTARE (PAIRING REQUEST). Poti verifica daca acest proces s-a incheiat in doua moduri

- Pozitioneaza-ti aparatele auditive pe urechi in timpul procesului de autentificare. Odata terminat procesul, o sa auzi o serie de 6 bip-uri urmate la scurt timp de un ton care marcheaza incheierea conectarii.
- Asteapta cel putin 60 secunde, pentru a fi sigur ca procesul s-a incheiat.

Pasul 2

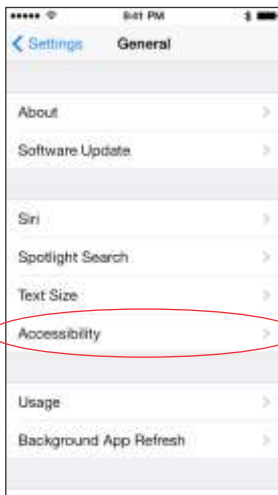


Pasul 3


Porniti aparatul
auditiv




Pasul 4

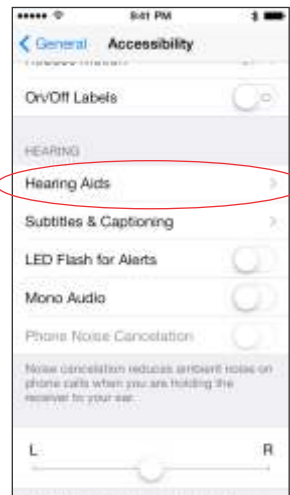


Pasul 5

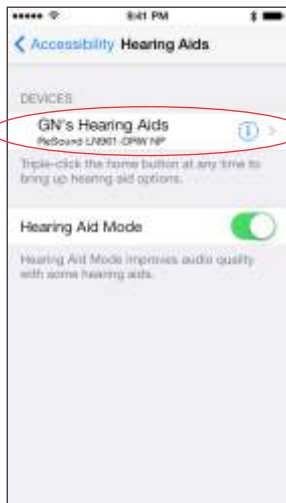

Pasul 6,7

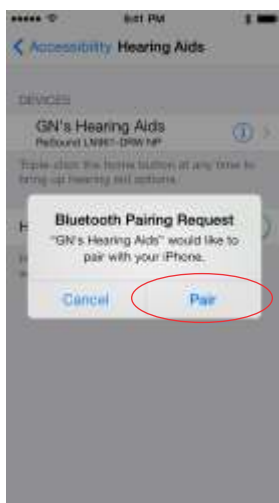

Pasul 8

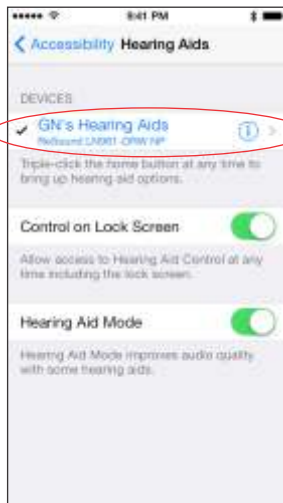

Reconectarea dispozitivului tau Apple


În momentul în care îți oprești aparatele auditive, acestea se vor deconecta. Pentru a le reconecta, pornește-ți aparatele auditive, închizând ușa bateriei. În acel moment Resound LiNX se vor conecta automat la iPhone, iPad sau iPod touch-ul tau.

Conectarea la mai multe dispozitive Apple

Cu Resound LiNX, poți conecta până la 5 dispozitive diferite Apple, dar nu în același timp. Poți conecta doar câte unul pe rând. Va trebui să deconectezi aparatul de la dispozitivul curent pentru a-l putea conecta cu unul nou.

Streaming de pe iPhone, iPad sau iPod touch, direct in aparatele tale Resound LiNX

1. Cand asculți muzica pe iPhone, iPad sau iPod touch, o poti transmite direct in aparatele tale auditive Resound LiNX. Selecteaza ca si sursa Aparate Auditive din Airplay si poti incepe sa asculți.

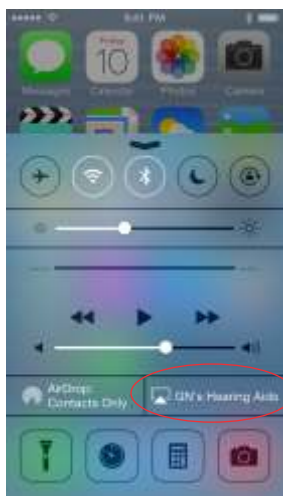

2. Cu Resound LiNX si iPhone poti transmite semnalul unei convorbiri telefonice sau FaceTime, direct in aparatele auditive. Incepe transmiterea selectand sursa iar prin simpla incheiere a apelului, se revine la functionarea normala a lui Resound LiNX




Controlul aparatelor auditive Resound LiNX, direct de pe iPhone, iPad si iPod touch

Cu aparatele auditive Resound LiNX conectate, poti modifica unele setari direct de pe iPhone, iPad si iPod touch- prin Setari (Settings) sau folosind shortcut-ul Accesabilitate (Accessibility)

Controlul aparatelor auditive Resound LiNX prin Setari (Settings)

Acceseaza aparatele Resound LiNX conectate prin meniul **Configurari (Settings)** > **General** > **Aparate Auditive (Hearing Aids)**. Apasa pe numele aparatelor tale auditive pentru a deschide mai multe optiuni.

Odata ajuns in acest meniu, poti sa vizualizezi informatii despre aparat, sa ajustezi volumul sau sa schimbi programele. De asemenea poti activa Live Listen®, care iti permite sa folosesti microfonul dispozitivului Apple, pentru a prelua sunetul si a-l transmite direct in aparatele auditive.

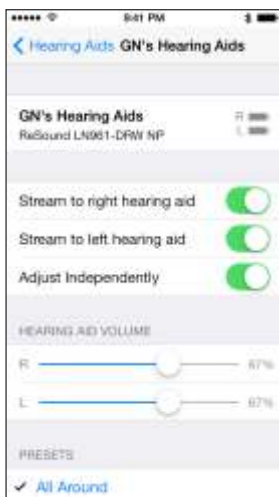

Controlul aparatelor auditive Resound LiNX prin shortcut-ul Accesabilitate (Accessibility)

Poti sa accesezi aparatele Resound LiNX prin shortcut-ul Accesabilitate (Accessibility) – (triplu clic pe butonul Home) pentru a schimba volumul, programe, etc...,

Informatii suplimentare

Pentru mai multe informatii si suport pentru Resound LiNX si functionalitatea lui Made For iPhone, va rugam sa contactati specialistul dumneavoastra in aparate auditive sau vizitati site-ul nostru pentru suport: www.audionova.ro



ReSound LiNX este compatibil cu iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad (a-4-a generatie), iPad mini cu Retina display, iPad mini, si iPod touch (a-5-a generatie) care ruleaza iOS 7.X sau mai recent.

Apple, logo-ul Apple, AirPlay, FaceTime, Live Listen, iPhone, iPad si iPod sunt marci inregistrate Apple Inc., in S.U.A si alte tari.

